



MS 80859840213

PRODUTO REGISTRADO PELA ANVISA

AUTOTESTE ANTÍGENO

NOVEL CORONAVÍRUS (COVID-19)



**RESULTADO EM
ATÉ 15 MINUTOS**

POR QUE ADQUIRIR O

AUTOTESTE ANTÍGENO

NOVEL CORONAVÍRUS (COVID-19)

Tenha uma alternativa para controle rápido, liberada pela **Anvisa** e já utilizada em alguns países da Europa e EUA: o autoteste de Covid-19.

[solicite a sua proposta](#)

OFEREÇA SEGURANÇA

AUTO EXAME

A **autotestagem** é feita e interpretada pelo próprio indivíduo e não é necessário treinamento prévio para a realização do procedimento.

[leia a bula](#)

***Não é necessário treinamento prévio.**



A melhor vantagem para quem quer precisão, **rapidez e segurança.**

solicite a sua proposta



A CPMH auxilia você desde a coleta até **os resultados** proporcionando segurança e precaução para o seu ambiente **conheça o nosso app para resultados**



**RESULTADO EM
ATÉ 15 MINUTOS**

VEJA COMO FUNCIONA



Assista o vídeo
para instrução de uso.

AUTOTESTE ANTÍGENO


NOVEL CORONAVÍRUS (COVID-19)

Interpretação do resultado:

Aguarde 15 minutos após a colocação das gotas para ler e interpretar o resultado do teste. Não espere mais do que 30 minutos para realizar essa leitura. Após este período de tempo, a leitura do resultado pode não ser confiável e é considerada inválida. Neste caso, refaça o teste com um novo kit.


- 1) Resultado Negativo: Somente é formada a linha vermelha na região C (Controle), como mostrado na figura (a) abaixo.

NEGATIVO

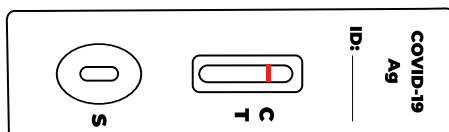


- 2) Resultado Positivo: É formada a linha vermelha na região T (Teste) e a na região C (Controle), como mostrado na Figura (b) abaixo.

POSITIVO

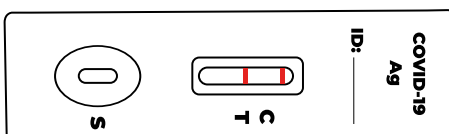

- 3) Resultado Inválido: Não é formada a linha vermelha na região C (Controle) durante o tempo do teste. O resultado é inválido e deve ser refeito.

INVÁLIDO

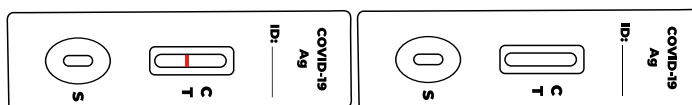

⚠ Atenção: Indivíduos com baixa carga viral podem levar à formação de linha vermelha na Região T (Teste) de cor fraca (muito clara), neste sentido considera-se o resultado positivo.



Importado por: CPMH – Comércio e Indústria de Produtos
Médico-Hospitalares e Odontológicos Ltda.
CNPJ: 13.532.259/0001-25. Endereço: SIA Trecho 17 Via IA-4 Lote 1235,
Parte 03. Zona Industrial (Guará). CEP: 71.200-260. Brasília/DF.
Tel. (61) 3028-8861
SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente:
www.cpmh.com.br/sac | (61) 3028-8883